

医 05 副木  
一般医療機器 手・指用副木


## ヘバーループ ガード (HeberLoop Guard)

### 【禁忌・禁止】

金属アレルギーの患者に使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状、構造

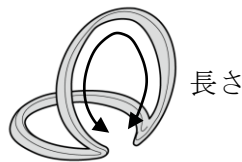

サイズ	関節周囲長 (mm) (参考)	長さ (mm)
ML	43 ~ 54	43±3
L	53 ~ 67	53±3
XL	62 ~ 78	62±4
3L	75 ~ 95	75±4

\*境界のサイズの場合は、小さめを選択すること。

#### 2. 原理

本品は、損傷した手指関節を固定する。

#### 3. 原材料

真鍮、銅合金めっき

### 【使用目的又は効果】

疼痛や腫れを生ずる関節、人工関節の動きを制動する目的で、損傷した手指関節を固定する。

### 【使用方法等】

1. 本品を、使用目的に応じていずれかの方法で指の関節に装着する。

#### (1) 曲げ装着

関節可動域を制限せず、関節の両側を固定する。



#### (2) 伸び装着


関節可動域を制限し、関節の全周の動きを固定する



2. 関節に合わせて、サイズを調整する。


#### (1) サイズが大きい場合

本品を装着した状態で、関節の両側から内側に押して大きさを調整する。

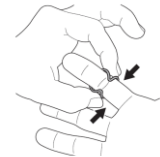

#### (2) サイズが小さい場合

本品を指から外し、指で左右に広げて調整する。

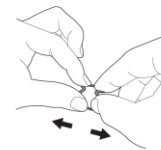

### 【使用上の注意】

- ・腐食や破損がないことを確認して使用すること。
- ・締めすぎに注意すること。
- ・使用中に発赤、かゆみ、かぶれを生じた場合は、ただちに使用を中止すること。
- ・破損の原因になるため、過度な曲げ、伸展を行わないこと。
- ・アクセサリ用クリーナーや入浴剤に接触させないこと。変色のおそれがある\*。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・高温・多湿、水濡れ、直射日光を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
- ・汚れた時は、柔らかい布で拭いて保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社メディカルラボパートナーズ