

医 05 副木

一般医療機器 手・指用副木

へばループ


(HeberLoop)

【禁忌・禁止】

金属アレルギーの既往歴がある患者に、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

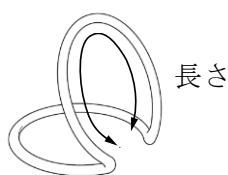

長さ

サイズ	関節周囲長 (mm) (参考)	長さ (mm)
S	30 - 39	27±3
M	38 - 50	34±4
L	47 - 62	43±4
XL	58 - 76	54±4

*境界のサイズの場合は、小さめを選択すること。

2. 原理

本品は、損傷した手指関節を固定する。

3. 原材料

真鍮、金めっき

【使用目的又は効果】

疼痛を生ずる関節の動きを制動させる目的で、損傷した手指関節を固定する。

【使用方法等】

1. 疼痛を生ずる指の関節に、本品を装着する。


- ・関節の両側を固定する場合の装着方法




- ・関節の全周の動きを固定する場合の装着方法



2. サイズが大きい場合、本品を関節に装着し、両側から内側に押しつけて大きさを調節する。

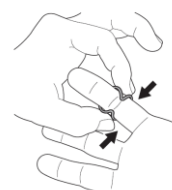

3. サイズが小さい場合、本品を指から外し、左右に広げて調節する。

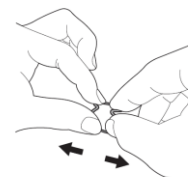

【使用上の注意】

- ・腐食や破損がないことを確認して使用すること。
- ・使用中に発赤、かゆみ、かぶれを生じた場合は、ただちに使用を中止すること。
- ・破損の原因になるため、過度な曲げ、伸展を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温・多湿、水濡れ、直射日光を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
- ・汚れた時は、柔らかい布で拭いて保管すること。
- ・アクセサリ用クリーナーを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社メディカルラボパートナーズ

製造業者

株式会社メディカルラボパートナーズ